

Test dépistage antigénique du Covid

Reference: P8697

Ce test de dépistage antigénique du coronavirus est un test chromatographique permettant la détection du virus 2019-nCov par un prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé. Tests vendus par boîte de 25, le prix indiqué correspondant au prix d'un test unitaire.

Simple d'utilisation le test covid antigénique salivaire et nasal permet de dépister la Covid-19 en seulement 15 minutes.

Important : Le test antigénique permet un dépistage précoce du Covid-19. Principe de la méthode : Notre test se lie à l'anticorps anti-SARS-CoV-2 inclus dans la zone de détection, montrant une bande rouge. Lorsque la réaction est terminée, les résultats peuvent être jugés par observation visuelle.

Mode d'emploi du test antigénique :

Le principe est similaire aux autotest covid

- 1 - Ajoutez 12 gouttes de tampon d'extraction d'échantillon dans le tube de traitement des échantillons.
- 2 - Insérez l'écouvillon dans le tube de traitement des échantillons. Bien mélanger tout en appuyant l'extrémité contre le fond et le côté du tube d'extraction pendant 10-15 secondes.
- 3 - Pour retirer l'écouvillon, appuyer sur les côtés du tube. Essayer de laisser autant de liquide que possible.
- 4 - Insérer fermement l'embout dans le tube d'extraction de l'échantillon. Renverser le tube d'extraction contenant l'échantillon et ajouter 2-3 gouttes d'échantillon, en faisant pression sur le tube de solution extraite, dans le puits réservé à l'échantillon.
- 5 - Attendre que la ou les lignes de couleur apparaisse(nt). Lire le résultat du test après 15 minutes. Ne pas interpréter le résultat après 20 minutes.

Test enregistré sur la plateforme COVID-19 du ministère des solidarités et de la santé.

Ses caractéristiques :

- tests covid fournis en kit individuel pour optimiser votre consommation
 - compte-gouttes à usage unique fournies avec les tests
 - 25 tests (réglettes), 25 écouvillons, 25 tubes à échantillons, 1 flacon de diluant et 1 notice fournies.
 - résultats en 15 min
 - coffrets de 25 kits
- utilisation par un professionnel de santé obligatoire

Certifications :

- Marquage CE
- Conformité HAS

Conservation et stabilité des tests : **entre 2 et 30°C.**

Avant la réalisation du test, il est conseillé de laisser le test atteindre la température ambiante, entre 15 et 30°C.

En cours de test pour devenir un autotest covid

Découvrez notre article sur la différence des tests covid.

Poids unitaire : 345 g
Conseils d'utilisation : Le kit de test doit être conservé dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Seuls des professionnels de santé peuvent utiliser ces tests.
Code douanier : 3002150090
Quantité par sous-carton : 25
Hauteur : 8.5 cm
Longueur : 20.5 cm
Largeur : 14 cm
Pays de fabrication : Chine
Date limite de consommation : 1 an
Usage du test : Test antigénique Covid-19
Normes et certificats : Conformité HAS
Quantité par carton : 100



:
Couleur: Blanc

**ENREGISTRÉ SUR LA PLATEFORME COVID-19 DU
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉ ET DE LA SANTÉ**

